


すーすーをご愛用いただき、ありがとうございます。


「鼻水が吸えなくなった」そんな時、次のチェック項目をご確認下さい。

	<p>メロディは鳴るのに吸引できない時、電池の残量が少ない場合があります。 充電タイプや購入から年月の経っている電池は電圧が徐々に下がりパワーが低くなっていることがありますので、新しい電池で再度お試しください。</p>
	<p>電池は正しくセットされていますか？ 電池ケースのフタを開けて電池を外すと、プラスマイナスの方向表示が確認できます。 左側：上(+)下(-) 右側：上(-)下(+)</p>
	<p>吸引チップを外した状態で、皮膚の柔らかい部分に当て吸引力が確認できますか？吸引チップを外すと吸引できる場合、吸引チップの中が汚れている可能性がありますので洗浄して下さい。</p>
	<p>ご使用方法によっては本体モーター側へ液体が浸入してしまう場合があります、サビによりモーター故障が起こります。洗浄後は吸引チップ、吸引カップ、吸引コネクタの水分を十分に切って本体モーター側へ液体が侵入しないようお気をつけ下さい。</p>
	<p>吸引コレクタの裏側にある2つの爪が折れていたり、変形していませんか？吸引カップをきちんと取り付けることができない状態では空気が漏れて吸引力が低下します。吸引コレクタは別売品として販売しておりますのでご連絡下さい。</p>
	<p>吸引カップを外し白い吸引コレクタの裏側に灰色の輪ゴムのようなゴムパッキンが確認できますか？ゴムパッキンを装着していないと空気が漏れて吸引力が低下します。ゴムパッキンは別売品として販売しておりますのでご連絡下さい。</p>

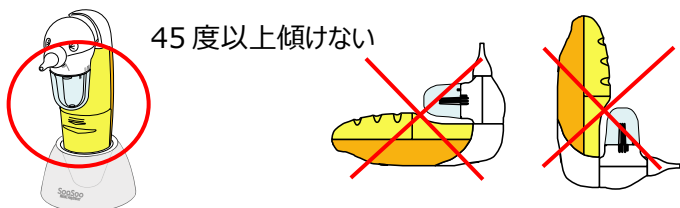

吸引時に45度以上傾けないようご注意ください。
吸引後や吸引一時中断時は専用スタンドをご使用下さい。吸引した分泌物がモーター側へ逆流して故障の原因とならないようお気をつけ下さい。

上記をご確認いただいてもモーターが動かず吸引できない場合は、下記フリーダイヤルまでご連絡下さい。

 0120-033379 (すーすーお客様係)